

ANEXO I (PNT-R058)/1ª


## INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE ORINA PARA GEN PCA3

1. Realización del **tacto rectal**
2. Recoger el **primer chorro de la primera orina** posterior (aproximadamente 20 a 30 mL) en un bote.
3. Inmediatamente, invertir el bote 5 veces para resuspender las células prostáticas. Con la pipeta suministrada en el kit, transferir **2.5 mL** de orina al tubo transportador (o medio de transporte de orina), hasta que el nivel de llenado esté entre las líneas negras.



4. Volver a tapar el tubo transportador de orina fuertemente e invertir 5 veces para mezclar.
5. Llevar al laboratorio lo antes posible

### PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE RECOLECCIÓN

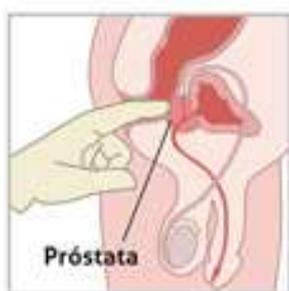

Tacto Rectal



Muestra de Orina



Medio de Transporte